

歯科材料(07) 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用ワックス成形品 JMDN31836020

## GEO クラスプワックス

### 【形状・構造及び原理等】 (\*\*)

- |                |          |
|----------------|----------|
| ・形状、型式         | オーダーナンバー |
| 小臼歯用クラスプ       | 688-3002 |
| 小臼歯用クラスプ 接着剤付き | 638-3002 |



- |                |          |
|----------------|----------|
| 大臼歯用クラスプ       | 688-3003 |
| 大臼歯用クラスプ 接着剤付き | 638-3003 |




- |                     |          |
|---------------------|----------|
| リングクラスプ ストレート       | 688-3004 |
| リングクラスプ ストレート 接着剤付き | 638-3004 |



- |               |          |
|---------------|----------|
| リングクラスプ       | 688-3005 |
| リングクラスプ 接着剤付き | 638-3005 |



- |               |          |
|---------------|----------|
| ローチクラスプ       | 688-3010 |
| ローチクラスプ 接着剤付き | 638-3010 |

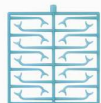

- ・主成分：パラフィンワックス、カルナウパロウ、色素
- ・原理：ワックスで既定の形状に成形されており、鑄造等によって金属に置き換えて使用する。

### 【使用目的又は効果】 (\*\*)

- ・可撤性局部義歯を維持するための器具を作製する場合に用いる材料をいう。ワックスで既定の形状に成形されており、たとえば鑄造等によって金属に置き換えて使用する。

### 【使用方法等】 (\*\*)

- ・症例にあわせパターンを加工する。
- ・キャストクラスプに置き換えたい部分に本製品を使用し、模型に圧接を行う。
- ・カービング・埋没は通法に従い作業する。

### 【使用上の注意】 (\*\*)

- ・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注すること。
- ・使用場所には消火器を備えること。
- ・他の製品と混用しないこと。
- ・本製品を使用する際には必ず換気をしながら使用すること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。(\*)

### 【保管方法及び有効期間等】 (\*\*)

- ・室温保管
- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・本製品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しないこと。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 (\*\*)

製造販売業者  
株式会社日本歯科商社  
製造業者  
レンフェルト社(ドイツ)  
(英名) RENFERT GmbH