

歯科材料(07) 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス JMDN16189000

## GEO ディッピングワックス

### 【形状・構造及び原理等】(\*\*)

- ・形状、型式                    オーダーナンバー
- イエロー・・・・・・・・・・ 482-3000
- オレンジ・・・・・・・・・・ 482-3200
- グリーン・・・・・・・・・・ 482-3300



レワックス イエロー・・・651-0000



### 【保管方法及び有効期間等】(\*\*)

- ・室温保管すること。
- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・本製品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に保管しないこと。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(\*\*)

製造販売業者  
株式会社日本歯科商社  
製造業者  
レンフェルト社(ドイツ)  
(英名)RENFERT GmbH



- ・主成分:天然及び合成ハフフィンワックス、色素

### 物理的性能

- ・ディッピングワックス : 融点 89°C~91°C
- ・レワックス : 融点 90°C~92°C
- ・原理 : ワックスポット等に入れて軟化させ、歯型をディッピングし、ろう型を作製するために使用する。

### 【使用目的又は効果】(\*\*)

- ・ロストワックス法による固定式補綴物のろう型作製のキャストイングワックスをいう。

### 【使用方法等】(\*\*)

- ・模型材の表面にワックス分離材を塗布する。
- ・ワックスポット等にワックスを入れ、歯型をディッピングさせる。
- ・モデリング、カービング、埋没等については通法に従い作業すること。

### 【使用上の注意】(\*\*)

- ・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ・使用場所には消火器を備えること。
- ・他の製品と混用しないこと。
- ・本製品を使用する際には、必ず換気をしながら使用すること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。(\*)