

◆ご使用する方々の医療関連感染対策チャート◆

使用目的	用途	商品名	成分内容等	使用方法
 手指衛生管理	●薬用石けん	医薬部外品 ニューハンドアウェイ ■容量:500mlムース容器 ■価格:1,540円 ■容量:4.3kg ■価格:5,720円	●イルガサンDP-300 ●陰イオン界面活性剤・香料	原液使用 ムース(泡状)ボトルより原液をとり、よく泡立たせ使用後は、流水で充分洗い流す。
 印象物の除菌と洗浄	●アルジネート/寒天/連合印象/シリコン印象物 ●石膏模型 ●各種補綴物	シーメス SEAMES LN ■容量:2L ■価格:6,160円 ■容量:4L ■価格:11,880円	●イルガサンDP-300 ●ベタイン型両性界面活性剤 ●エチルアルコール	原液使用 印象物を原液に浸漬します。(10分~15分間)浸漬後、印象物を水でよくすすぎ、水切りをして通法どおりの処理をして下さい。
 器具類の除菌と洗浄	●外科用器具 ●治療用器具 ●その他一般器具 バキュームチップ	シーメス SEAMES AL ■容量:2L ■価格:4,290円 ■容量:4L ■価格:8,470円	●トリアジン系抗菌剤 ●N ^o ココイル-アルギニンエチルエステル-DL-ピロリドンカルボン酸塩(CAE) ●金属イオン封鎖剤	浸漬洗浄は、10倍~50倍希釈液 超音波洗浄は、50倍~200倍希釈液 使用後は充分水洗いし、水切りをしてすみやかに乾燥する。
 小器具類の除菌と洗浄	●バー類 ●リーマ ●ファイル	ラストリン ■容量:2L ■価格:4,730円 ■容量:4L ■価格:8,470円	●塩化ベンゼトニウム ●CAE ●非イオン界面活性剤 ●防錆剤	原液~2倍希釈液を使用します。 使用後は水で充分水洗して下さい。 必要に応じオートクレーブ処理をして下さい。
 トレーの清掃・除菌	●アルギン酸塩印象材の剥離、溶解	シーメス SEAMES TCI (液体) ■容量:2L ■価格:5,060円 シーメス SEAMES TCI (粉末) ■容量:1kg ■価格:2,640円	●特殊溶解剤 ●酸素系無機化合物	●20倍希釈液で使用します。 ●1ℓの水に50g(添付スプーン約3杯)を溶かします。 ●活性酸素の働きにより除菌と清掃をします。 ●剥離溶解力も優れ清掃時間も短縮できます。
 パイプ類の洗浄と除菌	●バキュームライン ●スピットン	シーメス SEAMES BC ■容量:2L ■価格:3,960円 ■容量:4L ■価格:7,100円	●パラクロルメタキシレノール ●界面活性剤	5倍~10倍希釈液を使用します。 診療終了後に吸引流入させ、診療開始前に充分水洗いする。
 血液をすみやかに溶解	●微細器具 ●白衣・術衣 ●タオル	シーメス SEAMES BL ■容量:500mlスプレー容器 ■価格:3,190円 ■容量:1L ■価格:4,510円 ■容量:2L ■価格:8,090円	●蛋白分解酵素 ●界面活性剤	血液の付着した部分に噴霧します。(3分~10分放置) その後通常の洗浄をして下さい。
 高力価蛋白分解酵素	●インスツルメント全般	シーメス SEAMES EM ■容量:4L ■価格:9,800円	●高力価蛋白分解酵素 ●界面活性剤	100倍希釈した溶液に浸漬洗浄(酵素の効果を高めるために微温湯で希釈)



※ご採用のお客さまは、上記製品のカタログ及び製品ラベルを御参照のうえご使用して下さい。