

## ジグジェル

### 【禁忌・禁止】

本製品は技工作業にて使用するものですので口腔内では使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

- ・形状、型式  
1本入  
シリンジチップ3個入



- ・原理：シリンジから押し出されたジェルを模型に築盛して硬化させインプラントジグ製作等に使用する。
- ・主成分 二酸化ケイ素、アクリル樹脂
- ・硬化時間 紫外線ランプ 20秒
- 注意：可視光線照射器で重合した場合、未重合層が残る場合があります。

### 【使用目的又は効果】

- ・シリンジから押し出されたジェルを模型に築盛しインプラントジグ製作等に使用する。

### 【使用方法等】

- ・シリンジチップを本体に装着します。（シリンジチップはしっかりと装着して下さい。しっかりと装着されていないとシリンジチップの根元からジェルが漏れる恐れがあります）
- ・築盛したい場所にプランジャーを徐々に押しながら築盛を行います。
- ・築盛が終わったら紫外線ランプにて重合を行います。

### 【使用上の注意】

- ・本製品は鋳造用埋没材を使用した焼却用のパターンとしては使用しないこと。
- ・本製品は火気の近くや強い光源のある場所で作業しないこと。また、十分な換気がされている場所で使用すること。
- ・保護メガネ、手袋を装着して使用すること。皮膚に付着した際は、流水で洗浄すること。
- ・本製品が目に入った時には、すぐに流水で洗浄し医師の診断を受けること。
- ・本製品の使用により、発疹、皮膚炎等のアレルギー性症状を起した場合は使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ・本製品は、火気厳禁の冷暗所に保管すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・本製品は直射日光が当たらない暗所に保管すること
- ・本製品は1℃～30℃で保管すること。
- ・使用期間は製造から2年間。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
株式会社日本歯科商社  
製造業者  
バイオデン社(韓国)  
(英名)BIO DEN CO., LTD.