

機械器具(65) 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 JMDN38782000

デンバー マジックブラシ

【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用禁止: 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 注意事項の厳守: 器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
3. 異常時の使用禁止: 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 改造の禁止: 器具の形態変更や改造等はないこと。
5. 再使用禁止

【形状、構造及び原理】


1. 形状・形式 オーダーナンバー

シルバー サイズ スモール 1mm 930-103
ホワイト サイズ エクストラスモール 0.5mm 930-101

仕様

名称	ロッド識別色	ファイバーチップ径
スモール	シルバー	1.0mm
エクストラスモール	ホワイト	0.5mm

【外観写真】

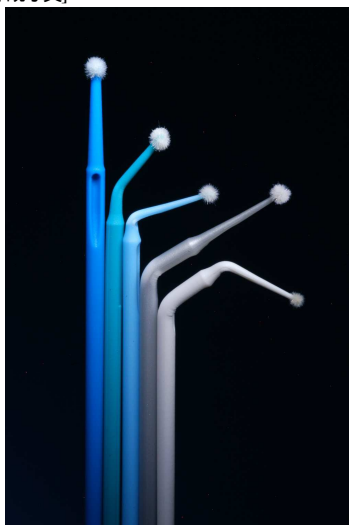

右から一番目

ホワイト サイズ エクストラスモール 0.5mm

右から二番目

シルバー サイズ スモール 1mm

2. 材質

ホモポリマー、ナイロン

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は、口腔内で充填材又は修復材等を適用するために用いるアプリケーションである。

2. 用途

- ・シーラント、ボンディング、エッチング、ライナー、歯垢染色液等の塗布
- ・築造過剰レジン除去

【使用方法】

- ①使用部位、目的に合わせ、根元の部分でハンドルを曲げます。
- ②本品の先端チップに材料を浸し、所要部位に塗布します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 本品は材料ごとに使い分けてください。

【使用上の注意】

[使用注意]

1. 本品は【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
2. 歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

[重要な基本的注意]

1. 使用には十分注意を払うこと。
2. ショルダー部で曲げる際には、折損することがあるので、無理な角度付け、過度の加圧での使用は避けること。
3. 使用後は、感染防止等に配慮して安全な方法で処分すること。
4. 再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

常温(但し結露しない。特に水濡れに注意すること)にて、貯蔵・保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 日本歯科商社

製造業者
デンバー社 (USA)
英名 Denbur, Inc.