

ミラーのくもり防止剤


# ミラー アンチフォグ



デンタルミラー、口腔内撮影用ミラーなどにご使用いただけるくもり止めです。


## くもり止めの原理

ミラーアンチフォグ塗布 ▶ 光が正反射

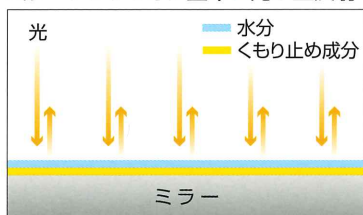

水滴にならないため、表面が均一に濡れているだけで曇らない

処理なし ▶ 光が乱反射

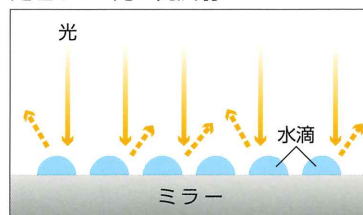

水滴の付着により、光の乱反射が起こり、白く曇って見える

## 効果試験データ

約70℃の水蒸気をミラーに当てて、チェス盤を映し出した結果




ミラーアンチフォグ塗布



処理なし

## 使用方法(デンタルミラーの場合)

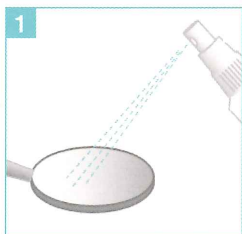

表面に1プッシュ噴霧



ミラー面全体を濡らす



自然乾燥または  
エアースリッジなどで乾燥

### 【使用上の注意】

ミラー表面の汚れや油膜は、本剤の曇り止め効果を阻害する原因となります。  
ご使用前には洗剤で十分に洗浄してから使用してください。

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

優れた  
曇り止め効果

高い安全性  
(食品添加物  
から組成)※

※経口毒性試験結果  
LD50 2000mg/kg以上

スプレー容器に  
入れて使用することで  
衛生的



価格 2,000円

包装 ●500mL 1本



●ミラーの噴霧に便利!  
●1プッシュ約0.3mL

別売品 ●ミラーアンチフォグ用  
スプレー容器(100mL)  
300円

製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111

大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085

北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001

九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造販売元 クリーンケミカル株式会社

ご用命は