

## 器 3 9 医療用鉗子

一般医療機器 歯科矯正用プライヤ JMDN33209000

## ピンカッター

## 【形状、構造及び原理等】



材料：ステンレス  
原理：手動式

## 【使用目的、効果又は効能】

小型のペンチで、小物を保持したり、金属片又はワイヤを屈曲又は切断するために用いるものをいう。

## 【品目仕様等】

外観に目立った傷及び汚損がないこと。

## 【操作方法又は使用方法等】

本品をしっかり持ち、使用する。必要に応じて滅菌する。

## 【使用上の注意】

1. 注意事項の厳守：器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
2. 使用者限定：歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
3. ステンレス鋼使用：素材のステンレス鋼は、鉄に比較して錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
4. 二次加工の禁止：破損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次加工（改造）を絶対行わないこと。
5. 家庭用洗剤の使用禁止：家庭用洗剤は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
6. 機能水の使用禁止：超機能水（超酸性水）等は金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
7. 洗浄、消毒、滅菌上の注意：
  - ・次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。（次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン）
  - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の

注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響（錆び等）を及ぼすことがある。

- ・使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ・洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）の乾燥温度には注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。

8. 磨き粉、金属ウール・金ブラシの使用禁止：腐食（錆び）の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。

9. 保管上の注意：「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

10. 取扱いについて：器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

## 【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後の点検：使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。

## 【包装】

ビニール袋 1 本入に 1 本包装

## 【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：有限会社 齋藤デンタル工業

許可番号：13B3X00030

〒124-0006 東京都葛飾区堀切 2-56-8

電話番号：03-3691-2219

ファックス：03-3691-9487

製造業者：有限会社 齋藤デンタル工業

許可番号：13BZ002400

〒124-0006 東京都葛飾区堀切 2-56-8

電話番号：03-3691-2219

ファックス：03-3691-9487