

デンタルウイルスガードフィルム

光触媒サガン®フィルム

(A4シートタイプ)


患者さん目線で 気になる『ユニット テーブル』

その中で汚れがちな操作パネル部分を美しく保ちたい先生へ

フィルム1枚から
はじめる感染予防対策

光触媒サガン®フィルム使用例

ユニットやスケーラーなど、診察機器のフラットなスイッチ部分などに。

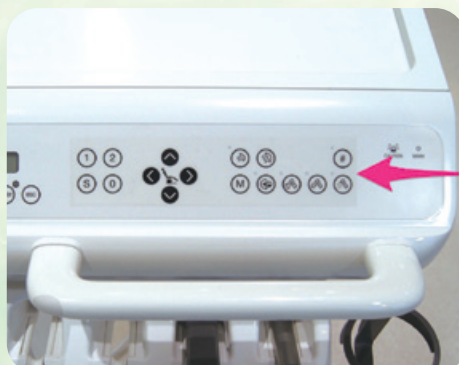

光触媒サガン®フィルムの特長

- ▶ 太陽光だけでなく、院内の蛍光灯やLED、无影灯の灯りでも抗菌効果を発揮します。
- ▶ 光触媒には臭いの原因となる有機物を分解し、脱臭効果があります。
- ▶ 保護カバーとして、操作パネルの汚れと劣化を防ぎます。

ご使用方法

- ① フィルムは自由な大きさ、形にカットします。
- ② 貼る前に操作パネル表面の汚れを拭き取ってください。
- ③ 粘着面カバーを剥がして操作パネル上に貼り付けます。
- ④ 保護カバーを剥がします。
※ カバーの隅にセロテープを貼り、その部分を持ち上げることで剥がしやすくなります。

光触媒サガン®フィルムの抗菌活性値

	光触媒サガン®フィルム	抗菌認証基準
黄色ブドウ球菌	4.4	2.0以上
大腸菌	5.1	2.0以上

一般財団法人 カケンテストセンター調べ

抗菌活性値とは・・・2.0以上(99%以上の死滅率)で抗菌効果があると規定されています。

抗菌活性値が『2.0』とは、菌数が1/100になり、『3.0』とは1/1000になることを表しています。

※黄色ブドウ球菌が『4.4』=1/10000以下、
大腸菌が『5.1』=1/100000以下に減少しています




ご使用例

- 歯科用ユニット 操作パネル部
- スケーラー等診療機器 操作パネル部
- その他移動機器 接触部
- ウォッシュレット 操作パネル部

フィルムの構成 A4サイズ(297mm×210mm)

光触媒サガン®フィルム 断面図

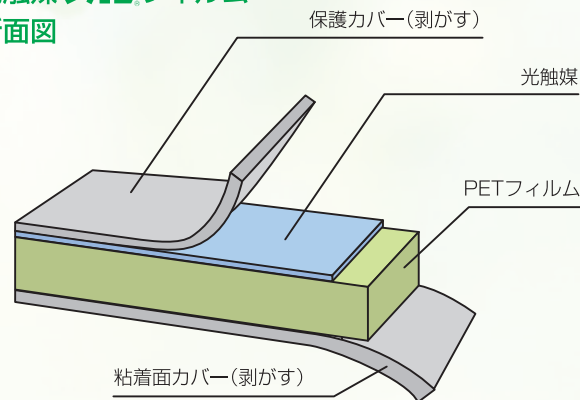

光触媒サガン®フィルム

価格: 6,800円
包装: 1枚 A4シートタイプ

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

【販売元】



株式会社 日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原1-19-5 TEL(03)3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-3-9 TEL(06)6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区16条西5-3-18 TEL(011)716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂4-16-22 TEL(092)436-2288

【製造元】

光触媒 サンプレス株式会社

〒933-0046 富山県高岡市中川本町16番1号 <http://www.ka-i-te-ki.com>

ご用命は