

デリケートなお口の健康に寄り添う、

(※)
無添加の義歯・口腔内装置用
マルチクリーナー

※合成界面活性剤・酸化防止剤・着色料・殺菌成分は添加していません。

たしかな洗浄力と除菌力を誇りながら、口腔内へのやさしさにもこだわりました。
デリケートなお口の健康に寄り添うクリーンケアを提供します。

Dental
Soap

洗浄成分は
石けん分のみ

除菌
肺炎桿菌
カンジダ菌
※1 ※2

バイオ
フィルム
除去 ※2

天然由来の
ミント香料

※1 全ての菌を除菌するわけではありません。 ※2 自社調べ



NEW

シャボン玉
デンタルソープ

きめ細かい泡とブラッシングによって

義歯、マウスピース、矯正用リテーナー、スポーツ用マウスガードを
手軽にすばやく洗浄する、泡タイプの義歯・口腔内装置用洗剤

成分：水、純せっけん分(脂肪酸カリウム)、香料

ボトル：150mL

希望患者価格：1,100円

医院価格：935円

合成界面活性剤・酸化防止剤・着色料・
殺菌成分は添加していません。

使用可能



総入れ歯、部分入れ歯、マウスピース、矯正用リテーナー、スポーツ用マウスガード

素材：アクリル樹脂・シリコン・チタン・金銀パラジウム合金・コバルトクロム合金・
ニッケルクロム合金・EVA樹脂・オレフィン系熱可塑性エラストマー

※価格は希望医院価格です(価格には消費税が含まれていません)。



株式会社日本歯科商社
JAPAN DENTAL SUPPLY

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原1-19-5 TEL(03)3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-3-9 TEL(06)6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL(011)716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂4-16-22 TEL(092)436-2288

ご用命は

長年の信頼を築いたシャボン玉石けんの品質をベースに開発した、泡タイプの義歯・口腔内装置用洗浄剤。口腔内の健康と環境にも優しい選択です。

洗浄方法

- 1 入れ歯に適量の泡をプッシュする。(目安:上の総入れ歯で2プッシュ)
- 2 柔らかいブラシで汚れをこすり洗います。(目安:約60秒)
- 3 洗浄後は流水ですすぐ。

※部分入れ歯、マウスピース、矯正用リテーナーも使用方法は同じです。

■総義歯




■部分義歯



■義歯洗浄剤の除菌試験結果


シャボン玉石けん(株)調べ

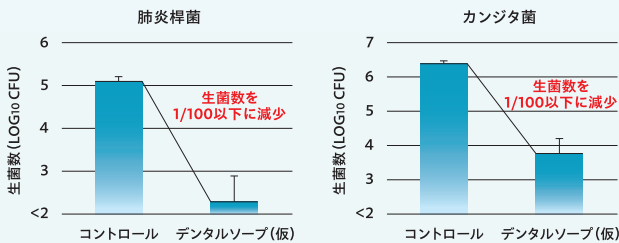

使用方法 洗浄剤を総義歯にポンプ2押し(約1.4mL)を目安に吐出し、義歯全体をブラシで磨いて流水ですすぐ。

サンプル 義歯洗浄剤 シャボン玉 デンタルソープ

■バイオフィーム除去

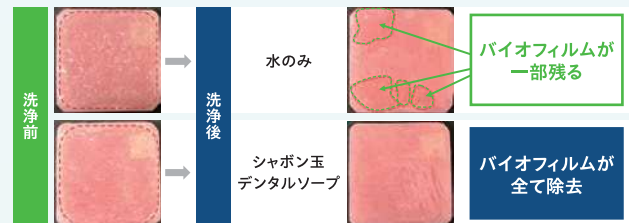


使用方法 洗浄剤を総義歯にポンプ2押し(約1.4mL)を目安に吐出し、義歯全体をブラシで磨いて流水ですすぐ。

サンプル 義歯洗浄剤 シャボン玉 デンタルソープ

シャボン玉石けんとは?

熟練の石けん職人が炊き上げる製造方法

製造名称	製造方法	期間
ケン化法 (釜炊き製法) 	油脂(脂肪酸・グリセリン)+ 苛性ソーダ・苛性カリ ⇒ グリセリンを含む石けん	完成まで約1週間

※他の製造方法=中和法: グリセリンを抜いた脂肪酸を反応させるため、4~5時間で完成するが、天然の保湿成分(グリセリン)が残っていないため、添加物で補う。

舌で出来具合を確かめる。
食品ではありません。
石けんの話です。



シャボン玉石けん株式会社 代表取締役社長 森田 隼人


シャボン玉石けんの特長

メリット1 身体にやさしい

合成界面活性剤・酸化防止剤・着色料・殺菌成分は添加していません。
敏感肌や乾燥肌の方、小さなお子様、ご年配の方も安心してご使用いただけます。



メリット2 環境にやさしい

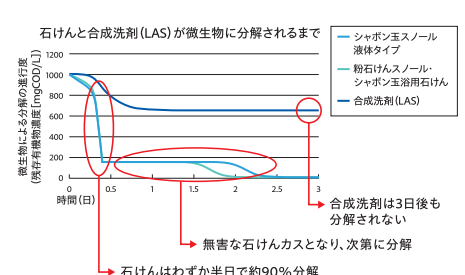

実験機関:北九州市立大学 環境・消防技術開発センター

シャボン玉 販売株式会社

〒803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1-5F