

歯科材料(09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

スレンダーブラシ

【形状・構造及び原理等】(\*\*)

- 形状、型式 オーダーナンバー
12 個入り . . . . . 787-1000



- 作業部: φ36mm
原理: 高速レーズ等に装着し、金属床等の研磨を行うために使用する。(\*)

【使用目的又は効果】(\*\*)

- 補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

【使用方法等】(\*\*)

- スレンダーブラシに研磨ペースト等を付ける。
スレンダーブラシを高速レーズ等に装着し、回転させ断続的に被切削物に研磨する。
最大回転数: 4,000rpm

【使用上の注意】(\*\*)

- 本製品は、レーズメーカーの指示に従って、ブラシを確実に装着し、使用中にブラシが外れないように注意すること。
使用前に回転させて振れがないことを確認すること。
本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
錆び、損傷、変形(表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
目を保護するために保護メガネなどを使用すること。
最大回転数を超えて使用しないこと。
本製品により研削した粉塵、破片が目に入らないように注意すること。万一目に入った時には、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。(\*)

【保管方法及び有効期間等】(\*\*)

- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(\*\*)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名) RENFERT GmbH