

機械器具(68) 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器 JMDN10201000

スリーラインカラー咬合器

【形状・構造及び原理等】(**)

- ・形状、型式
- 1個入り
- 3個入り



- ・高さ : 90mm
- ・奥行 : 120mm
- ・幅 : 100mm
- ・材質
 - 上顎模型弓 : アルミニウム
 - 下顎模型弓 : アルミニウム
 - 上顎固定ネジ : ステンレス鋼
 - 顎頭軸 : ステンレス鋼
 - 顎頭軸ハンドル : ステンレス鋼
 - 顎路指導版 : 鋼材
 - マウンティングピン : ステンレス鋼
 - スプリング : ステンレス鋼
- ・原理 : 歯牙模型を装着し、咀嚼運動を再動し、補綴物等を作製するために使用する。(*)

【使用目的又は効果】(**)

- ・蝶番付きの歯科用器具で予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を本製品に取り付ける。下顎運動の一部または全部をシミュレートするように設計されている。補綴物製作において、口腔内の状態を再現するために使用する。(*)

【使用方法等】(**)

- ・石膏付着部にワセリンを塗る。(*)
- ・上下顎模型を中心位にて咬合させ、仮着する。(*)
- ・維持部に石膏をつぎ、模型を装着させる。(*)

【使用上の注意】(**)

- ・本製品には、縁端が鋭い部分があるため、使用中に手指などを傷つけないように注意すること。
- ・石膏付着部はワセリンなど分離材を塗布すること。(*)

【保管方法及び有効期間等】(**)

- ・水分や各種の汚れが付着したまま本体を放置すると錆びの原因となるので、使用後は各部を良く清掃してから保管すること。ただし、表面の清掃にはベンジン、シンナー、レジジン液などの溶剤の使用は避けること。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(**)

製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
ソンヤンインターナショナル社(台湾)
(英名)SONG YOUNG INTERNATIONAL CO.