

ネオ ステイン

ネオ ステイン
Neo Stain

WILL GELLER
Creation



Sascha Hein, ZTM

ネオ ステイン

ネオ ステインはイン ノバ ネオの総称です。基本的に従来のメイクアップとインノバの色構成に準じて作られています。メイク アップ ネオはペーストタイプのステインで、表面ステイン及び内部ステインとして使用できます。イン ノバ ネオはパウダータイプで、表面に使用することができません。融点が低いので、CCやZI-CTはもちろん、ZI-Fなど、低融陶材に安心して使用できます。これらステインの練和にはユニバーサルリキッドを使用します。

イン ノバ ネオ In Nova NEO

イン ノバ ネオは陶材に混ぜて彩度調整をしたり、内部ステインとして使用する、パウダータイプのボディモディファイヤーです。ポーセレンの最表層に使用することができません。ジルコニアフレームの彩度調整に使用することができます。

イリュージョンとクラックライナーもイン ノバネオの商品となり、陶材内部に安心して使用できるようになりました。



メイク アップ ネオ Make Up NEO

メイク アップ ネオはペーストタイプのステインで、蛍光性を有しており、表面ステイン及び内部ステインとして使用できます。使用する際にペーストが固まっていたら、専用のリコンディショナーリキッドをごく少量使い、潰すようによく練和して下さい。ジルコニアフレームの色調整に使用する場合はFS-NTに混ぜて使用します。



ネオ ステイン Neo Stain



COLOR CHART

イン ノバ ネオ (粉末3g)




1本 (3g) 各9,500円 イン ノバ ネオ フルード (25mL) 4,000円

イン ノバ ネオは陶材用の蛍光性を有するユニバーサルモディファイヤーです。オパークとオパークモディファイヤーには使用できません。その蛍光性により、イン ノバ ネオは効率良く円滑に歯の色調を表現することが出来ます。またわずかな量の混和で陶材をモディファイできます。ポーセレンの表面に使用することは出来ません。

使用例)

- ・ 強調したい色調のイン ノバ ネオをデンチンに混ぜて使用します。
- ・ イリュージョンテクニックや3Dクラックラインの形成に使用します
- ・ ジルコニアコーピングを歯冠色に色調整する場合に使用します。

メイク アップ ネオ (ペースト4g)

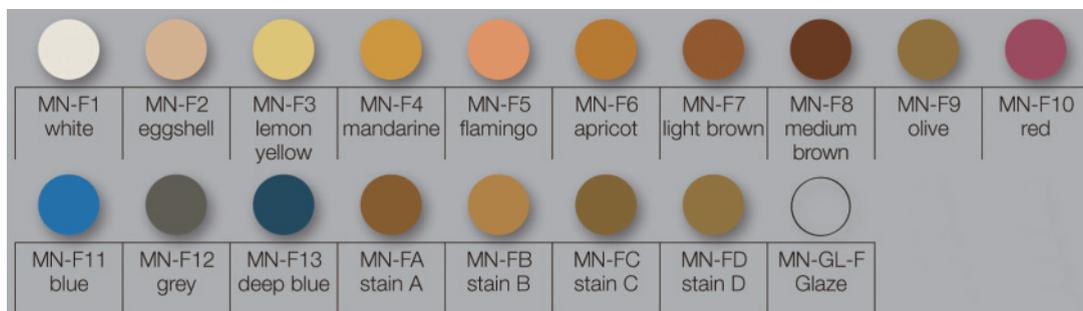

1本 (4g) 各9,500円メイク アップ ネオ フルード (25mL) 4,000円
リコンディショナー フルード (8mL) 4,300円

メイク アップ ネオは内部ステインや表面ステインとして使用できます。表面ステインの場合はグレースパウダーに混ぜて800-900℃で焼成します。

使用例)

- ・ デンチン焼成時の内部ステインに使用します。
- ・ 形態修正後のクラウンの表面ステインに使用します。
- ・ 築盛したパウダー表面に付与して使用します。
- ・ フレームシェードFS-NTに混ぜてジルコニアフレームの色調整に使用します。

ネオ ステイン クリアカラーセット 250,000円
ネオ ステイン イン ノバ ネオセット 110,000円
ネオ ステイン メイク アップ ネオセット 165,000円

*価格は希望医院価格です (価格には消費税は含まれません)

管理医療機器 226AFBZX00024000
製造販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪本社：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は

