

## サラヤ プラスチックガウン


DISPOSABLE PE GOWN

Personal Protective Equipment



- 標準予防策では、湿性生体物質の跳ね返りやしぶきが生じる手技・患者のケアを行う場合、皮膚と着衣を保護するためにガウンの着用がすすめられています。
- 最も汚染されやすい体幹前面から腕までを覆う形状です。
- 袖口の形状がゴム袖式です。
- 防水性の高いポリエチレン製です。
- 様々なシーンでお使いいただけます。(医療・介護など)

### ゴム袖式

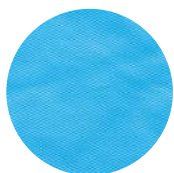

ブルー




プラスチックガウン袖つき  
フリーサイズ 15枚入

価格 1,680円

### 着け方

#### プラスチックガウン(袖つき)

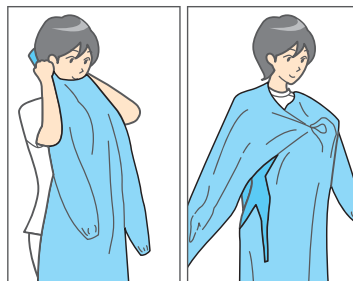

① 首の部分を持ってかぶる



② 片腕をガウンの袖に通す



③ 反対の腕をもう片方の袖に通す



④ 腰ひもを結ぶ

### 注意

- 本品は Disposable 製品ですので、1 回限りの使用とし、再使用はしないでください。
- 使用後は、適切に廃棄してください。
- 本品は未滅菌です。

# SARAYA


## サラヤ プラスチックエプロン (PPE) (袖なし)

### 飛沫、接触感染の防御


防水性の高いポリエチレン製で、血液、体液等の湿性生体物質を通さず、医療従事者と患者の双方における感染リスクを低減します。



- ・標準予防策では、湿性生体物質の跳ね返りやしぶきが生じる手技・患者のケアを行う場合、衣類や皮膚を保護するためにエプロンを着用します。
- ・エプロンは最も汚染されやすい体幹面を覆い、防水性であることが求められます。
- ・脱衣時は、汚染面に触れないように注意し、廃棄後は、手指衛生をしっかり行うことが重要です。

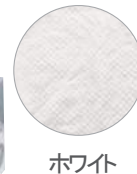

サイズ: 1種 フリーサイズ (720 × 1,250mm)  
カラー: 1色 ホワイト  
包装: 1函 50枚入り

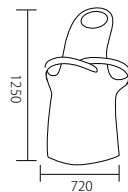

価格: 670円

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

### 注意

- 本品は Disposable 製品ですので、1回限りの使用とし、再使用はしないでください。
- 使用後は、汚染部分に触れないように廃棄してください。
- 本品は未滅菌です。

### 着け方



① 首の部分を持ってかぶる



② 腰ひもを結ぶ

### 外し方



① 首の部分を持って体の前に強く引き、首ひもを切る



② エプロンの表側が内側になるようにして腰ひもの高さまで2つに折り込み、表側に触れないよう注意しながら両手でエプロンの裾をすくい上げる



③ 表側が内側になるようまとめる



④ 体の前方へ強く引いて腰ひもを切り、エプロンの表側に触れないよう注意しながら、廃棄する

### 株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は